



DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO REFERÊNCIA

11005

NCM

48.19.10.00

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13 (UC)

7898939098549

UNIDADE DE CONSUMO

1 caixa

CORES

Amarelo ouro, preto e branco

VALIDADE

5 anos

ANVISA

Isento

CAPACIDADE TOTAL

1,5L

CAPACIDADE ÚTIL

1,05L

CAPACIDADE NOMINAL

525 kg

Medida da caixa coletora em cm.

C21,5 L11,5 A15

DADOS DE DESPACHO

DESCRIÇÃO FATURA

Caixa Perfurocortantes 1,5L Extra Cx C 20 Un

CÓDIGO DE BARRAS DUM (UD)

17898939098546

EMBALAGEM

Caixa de papelão com 20 unidades

MEDIDAS EM CM

C39 L20 A24

PESO APROXIMADO

2,600 kg

CUBAGEM

0,0187m³

NORMAS TÉCNICAS

ABNT

15.853-1 | 7500



FICHA TÉCNICA · FLEXPELL HOSPITALAR

Coletor Infectante 1,5L EXTRA Amarelo Ouro cx c/20 un

FLEXPELL · Cód. 11005 · Unidade: CX · Emb. 24 x 20 x 39 cm · Cubagem 0,0187 m³ · Peso 2,600 kg

Características

Matéria-prima produzida em papelão ondulado branco onda "B", tabuleiro resinado, cinta e fundo de papelão rígido (papelão couro), sacola de polietileno de alta densidade "PEAD".

Recomendações e cuidados

1. Uso único, armazenar embalagem original em local seguro, seco, sem odor.
2. Utilizado para descarte materiais infectantes, perfurantes e ou cortantes.
3. Manusear afastado do corpo.
4. Não encher ultrapassando a linha pontilhada.
5. Não descartar em lixo comum, identificar após cheio e destinar o descarte conforme legislação ambiental vigente.
6. Não estéril.
7. Classe de risco I.
8. Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
9. Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

Instrução de montagem

1. Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar;
2. Abra as abas superiores do coletor;
3. Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico;
4. Introduza também a cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro;
5. Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
6. Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
7. Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
8. Faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
9. Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
10. Não manuseie, entorte os perfurocortantes;
11. Travar o lacre para fechamento para descarte.
12. Identifique e date.

Garantia

A garantia deste produto está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica, as informações estão sujeitas a alterações sem comunicação prévia.

Flexpell Hospitalar Ltda · Rua João Zamariam, 515 · Distrito Industrial II, Mococa/SP · CEP 13739-020
vendas@flexpell.com.br · (19) 3666-6200 · www.flexpell.com.br