



DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO REFERÊNCIA

11001

NCM

48.19.10.00

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13 (UC)

7898939098921

UNIDADE DE CONSUMO

1 caixa

CORES

Amarelo, preto e branco

VALIDADE

5 anos

ANVISA

Isento

CAPACIDADE TOTAL

3L

CAPACIDADE ÚTIL

2,1L

CAPACIDADE NOMINAL

1,050 kg

MEDIDA DA CAIXA COLETORA EM CM

C12,5 L11,5 A15

DADOS DE DESPACHO

DESCRIÇÃO FATURA

Caixa Perfurocortantes 3L Eco Cx C/20 Un

CÓDIGO DE BARRAS DUM (UD)

17898939098928

EMBALAGEM

Caixa de papelão com 20 unidades

MEDIDAS EM CM

C45 L20 A25 cm

PESO APROXIMADO

3,530 kg

CUBAGEM

0,0225m³

NORMAS TÉCNICAS

ABNT

15.853-1 | 7500



FICHA TÉCNICA · FLEXPELL HOSPITALAR

Coletor Infectante 3L ECO Amarelo cx c/20 un

FLEXPELL · Cód. 11001 · Unidade: UN · Emb. 25 x 20 x 45 cm · Cubagem 0,0225 m³ · Peso 3,530 kg

Características

Matéria-prima produzida em papelão ondulado pardo onda "B", tabuleiro resinado, cinta e fundo de papelão rígido (papelão couro), sacola de polietileno de alta densidade "PEBD".

Recomendações e cuidados

1. Uso único, armazenar na embalagem original em local seguro, seco e sem odor.
2. Utilizado para descarte de materiais infectantes, perfurantes e ou cortantes.
3. Manusear afastado do corpo.
4. Não encher ultrapassando a linha pontilhada.
5. Não descartar em lixo comum, identificar após cheio e destinar o descarte conforme legislação ambiental vigente.
6. Não estéril.
7. Classe de risco I.
8. Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
9. Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

Instrução de montagem

1. Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar.
2. Abra as abas superiores do coletor.
3. Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico.
4. Introduza também a cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro.
5. Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor.
6. Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor.
7. Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo.
8. Faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro.
9. Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa.
10. Não manuseie, entorte os perfurocortantes.
11. Travar o lacre para fechamento para descarte.
12. Identifique e date.

Garantia

A garantia deste produto está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica, as informações estão sujeitas a alterações sem comunicação prévia.

Flexpell Hospitalar Ltda · Rua João Zamariam, 515 · Distrito Industrial II, Mococa/SP · CEP 13739-020
vendas@flexpell.com.br · (19) 3666-6200 · www.flexpell.com.br