



DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO REFERÊNCIA

11017

NCM

48.19.10.00

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13 (UC)

7898963169468

UNIDADE DE CONSUMO

1 caixa

CORES

Laranja, preto e branco

VALIDADE

5 anos

ANVISA

Isento

CAPACIDADE TOTAL

20 L

CAPACIDADE ÚTIL

14 L

CAPACIDADE NOMINAL

7,0 kg

**Medida da caixa coletora em cm. C30
L24 A29,5**

DADOS DE DESPACHO

DESCRIÇÃO FATURA

**Caixa Coletora Resíduos Químico e
Quimioterapico 20L Cx C/20 Un**

CÓDIGO DE BARRAS DUM (UD)

17898963169465

EMBALAGEM

Caixa de papelão com 20 unidades

MEDIDAS EM CM

C73 L20 A54

PESO APROXIMADO

12,545Kg

CUBAGEM

0,0761m³

NORMAS TÉCNICAS

ABNT

13.853-1 | 7500



FICHA TÉCNICA · FLEXPELL HOSPITALAR

Coletor Quimioterápico 20L LARANJA QQ cx c/20 un

FLEXPELL · Cód. 11017 · Unidade: UN · Emb. 54 x 20 x 73 cm · Cubagem 0,0788 m³ · Peso 12,545 kg

Características

Matéria-prima produzida em papelão ondulado pardo onda "B", tabuleiro resinado, cinta e fundo de papelão rígido (papelão couro) Laminado tipo alumínio, sacola de polietileno de alta densidade "PEAD".

Recomendações e cuidados

1. Uso único, armazenar na embalagem original em local seguro, seco e sem odor.
2. Utilizado para descarte de materiais infectantes, perfurantes e ou cortantes.
3. Manusear afastado do corpo.
4. Não encher ultrapassando a linha pontilhada.
5. Não descartar em lixo comum, identificar após cheio e destinar o descarte conforme legislação ambiental vigente.
6. Não estéril.
7. Classe de risco I.
8. Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
9. Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

Instrução de montagem

1. Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar;
2. Abra as abas superiores do coletor;
3. Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico;
4. Introduza também a cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro;
5. Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
6. Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
7. Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
8. Faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
9. Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
10. Não manuseie, entorte os perfurocortantes;
11. Travar o lacre para fechamento para descarte.
12. Identifique e date.

Garantia

A garantia deste produto está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica, as informações estão sujeitas a alterações sem comunicação prévia.

Flexpell Hospitalar Ltda · Rua João Zamariam, 515 · Distrito Industrial II, Mococa/SP · CEP 13739-020
vendas@flexpell.com.br · (19) 3666-6200 · www.flexpell.com.br